

ポータブルトイレ

ポータブルトイレと関連用品選びのポイント


ポータブルトイレ

移動が困難で寝室からトイレまで長いと感じる場合等、移動動作が困難な人の排泄の自立に役立ちます。




家具調スクリーン

ポータブルトイレの使用時や着替えの時の目隠しとして、ご利用者のプライバシーを守ります。

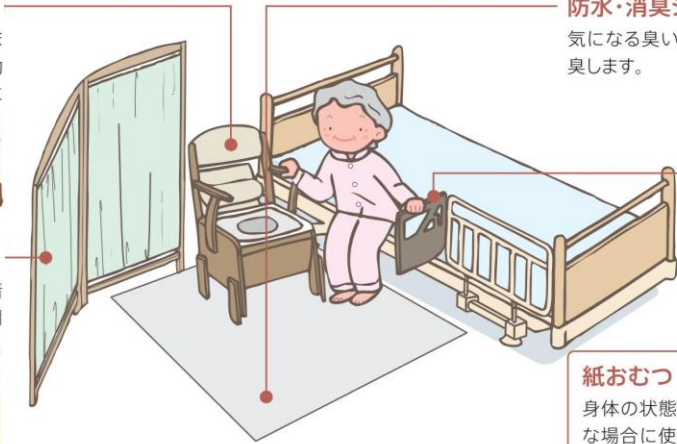

防水・消臭シート

気になる臭いを素早く吸収・消臭します。

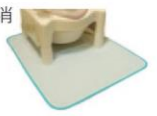

ベッド用グリップ

ポータブルトイレなどへの移乗の際に、立ち座りをサポートします。



紙おむつ

身体の状態や体調により、自然排便が困難な場合に使用します。失禁不安解消のための使用も効果的です。

ポータブルトイレの種類と機能

お部屋の雰囲気と
マッチさせたい



家具調タイプ

重量があり、頑丈で安定性があります。



軽量でお手入れが
簡単なものを



プラスチックタイプ

立ち座りが容易にできる方に。



●必要に応じてお選びください

快適機能

洗浄



- 温水洗浄でいつも清潔。
- 紙でおしりを拭くのが大変な方に。

脱臭



- 脱臭剤や排泄物のにおいが気になる方へ。

暖房便座



- 暖房便座で冬もあたたか。

ソフト便座



- やわらかい座面で長時間でも疲れにくい。

立ち座りが不自由な方

1



トイレの座面とベッドの高さを合わせると使いやすくなります。

2



ベッドの上とポータブルトイレに手を置き体を移動します。

3



お尻を滑らすように移動します。

4



負担が少ない移動ができます。

立ち座りができる方

1



腰掛けて便座を上げます。

2



ベッド用グリップを持ち立ち上がります。

3



ベッド、トイレの手すりを持ち移動します。

4



前かがみになり、腰を下ろします。

5



排泄後お尻をずらし拭きます。

6



トイレのひじ掛けを持ちベッドに移動。