






歩行器・歩行車

歩行器・歩行車の種類と選びのポイント

歩行器・歩行車はつえを使用する場合に比べ、歩行の耐久性(能力)や歩行のバランスが低い場合に使用します。四脚のフレームを持ち上げたり、滑らせて使う歩行器と脚部全てに車輪の付いた歩行車があります。身体状況を考えて無理なく使える用具を選びましょう。

歩行器	姿勢が安定している方	固定型歩行器 両手で歩行器を持ち上げて前方に運んで使用します		歩行器を両手で持ち上げて前に運び、体を前進させて使用します。固定式ですのでベッドからの立ち上がりにも使用可能です。
	姿勢のバランスがとりにくい方	交互型歩行器 左右のフレームを交互に動かして、前方に進みます		左右のフレームの一方を持ち上げて前へ運び、同じ側の足を前進させたあと、反対側のフレームを同様に前進させて歩行します。
	姿勢が安定している方	前輪付歩行器 双輪キャスターで方向転換がスムーズです		固定型歩行器に前輪をつけたもので、補助的な後輪がついたタイプもあります。荷重によってストッパーが作動し立位を支えます。
歩行車	立位バランスが不安定な方	肘支持型歩行車 動きが安定する後輪固定と自由に動く四輪自在の2タイプをご用意		上部のパッドに腕や脇をかけて上体を支えながら歩行します。取り扱いが平易なため、早期の歩行訓練から使用できます。
	持続して歩行が難しい方	三輪・四輪歩行車 疲れた時や緊急時に座れる機能が付いた安心設計		左右のハンドルを握って歩行します。買い物用のかごや収納バッグ、座席が付いているタイプもあります。

歩行補助つえの種類と選びのポイント

歩行時に身体を支え、バランスを維持します。つえの性能や使い方とご利用者の身体状況を考えて無理なく使えるつえをお選びください。

歩行器を使いたいが、片手しか使えない方へ	→	サイドウォーカー 体の横で支え、安定性に優れています。		多脚杖以上に安定感に優れています。立ち上がりの補助としても使用可能。広い平らな場所での使用に適しています。
一脚づえでは、不安定な方へ	→	多脚づえ 支持面積が広く、安定性が高い杖。		3~4本の脚で歩行姿勢を支えます。サイドウォーカーよりコンパクトで、平らな空間での使用に適しています。
片足に体重をかけられない方へ	→	松葉づえ 上肢全体で支え、側方への安定性が高い杖。		左右の脇下に1本ずつ挟み、手で握って使用します。ロフストランドクラッチより安定性に優れています。
握力や手首の力の少ない方へ	→	ロフストランドクラッチ 前腕部で支える杖。		握りとカフ(腕をホールドする部分)で前腕を支えるため、握力が十分でない場合でも使用可能です。
手指の変形やリウマチの方に	→	プラットホームクラッチ 前腕部で支える杖。		「前腕支持部」に腕を乗せて体重を支え、バランスを保つ程度にグリップを使用します。グリップは角度調整可能です。
ちょっと足腰が弱ってきた方へ	→	ステッキ・T字型つえ ちょっと足腰が弱ってきた方へ。 お買い取り専用商品		グリップと支柱のみの一本脚によるつえ。比較的歩行バランスの良い方、適度な握力のある方に適しています。

手すり

どこでも手すりシリーズ 玄関先から寝室やリビングまで、使う場所を選ばない「どこでも手すり」

工事
不要

こんな時に手すりがあったら...



ふだんの生活シーンで、「ここに手すりがあれば楽なのに…」と感じることはありませんか? 「どこでも手すり」は、お好きな場所に置いて使えます。高さ3段階調節

「木製どこでも手すり」は、しっかり握れるディンプル加工でフィット感抜群です。また、向きに関係なく置けるので右利き左利きどちらの方にも使いやすい手すりです。



自立支援の強い味方! 取り付けも取り外しも簡単手すり。

工事不要の突っ張り固定式の手すりです。お部屋の中央にも手すりを設置できて便利です。豊富な部材で、目的に応じた設置が可能。横手すりを使えば、玄関から廊下、各部屋まで連続的につなぐこともでき、立ち座りから歩行までの自立を支援します。

取り付け可能天井高さ210~290cm

工事
不要

- 基本セット**
手すりを組む場合の基本となるバーです。各種手すりをセットしたり、複数で使用したりします。
- 基本セット + U型手すり**
ベッドなどから立ち上がる時に便利なU字型の手すりをセットしました。
- 基本セット + ウェーブ型手すり**
和室やトイレなどで使いやすいI型の手すりをセットし握り部が滑りにくいウェーブ形状になっています。
- 基本セット (×2) + 蓄光跳上げ手すり + ウェーブ型手すり**
手すりは端から端まで蓄光素材を使用しています。蓄光連結跳上げ手すり和基本セットを追加していけば、廊下の手すりも設計できます。
- 基本セット + T型アーム**
玄関の段差を上り下りするのに必要な奥行きと動きの流れをスムーズにするアーチ形状がシンプルにご利用者をサポートします。



【設置例】



ベストポジションバーには、いろんなシーンに対応した各種手すりもご用意。

- U字手すり**
U型形状なので、どの方向からも握りが容易です。
- ウェーブ型アーム**
握り部分がウェーブ状になっています。
- I型アーム**
ストレートな手すりもご用意。
- 玄関用手すりLUNA**
T型アーム アーチ形状が新登場。

NEW